

Гідрогель Hydrosorb® Gel



Інструкція із застосування

Hydrosorb® Gel - прозорий, в'язкий, стерильний гель на основі розчину Рінгера, гліцерину, гідроксietилцелюлози, карбоксиметилцелюлози. Hydrosorb® Gel не містить поліетиленгліколь,

Властивості і спосіб дії

Гель Hydrosorb® Gel забезпечує вологе середовище в рані, яке сприяє більш швидкому її загоєнню.

Залежно від стану рани, гель Hydrosorb® Gel розм'якшує сухі некротичні тканини, полегшує видалення омертвілої тканини і поглинає ранове відокремлюване і ексудат (слабо ексудуючі рани).

Гель Hydrosorb® Gel можна змивати стерильним розчином Рінгера або іншим підходящим стерильним розчином, не порушуючи при цьому стану спокою рани і не пошкоджуючи новоствореної тканини.

На початку лікування за допомогою гелю Hydrosorb® Gel в деяких випадках можливе збільшення розмірів рани через відторгнення змертвілої тканини (це перша ознака початку процесу загоєння рани).

Галузь застосування

Гель Hydrosorb® Gel підходить для лікування більшості типів поверхневих і глибоких ран, наприклад, виразок, пролежнів та ран іншого генезу з незначною ексудацією.

Гель можна використовувати для розм'якшення і гідратації некротичних тканин. Створюючи вологе ранове середовище на поверхні рани, гель Hydrosorb® Gel підтримує її ендогенне очищення та усунення некротичної і авітальної тканини.

Вказівки із застосування

1. Застосування гелю Hydrosorb® Gel

- Перед нанесенням гелю обробіть рану розчином Рінгера або іншим підходящим стерильним розчином. Ретельно висушіть шкіру навколо рани.
- Витягніть стерильний шприц з блистерної упаковки і зніміть захисний ковпачок.
- Тримайте отвір шприца на відстані від ранового ложа і нанесіть на рану шар гелю товщиною приблизно 5 mm (мм).
- Покрийте рану підходящою вторинною пов'язкою.
- Вміст шприца не можна одночасно використовувати декільком пацієнтам.
- Невикористаний гель слід знищити.

2. Усунення гелю Hydrosorb®

- Для усунення нанесеного гелю Hydrosorb® Gel промийте рану стерильним розчином Рінгера або іншим відповідним стерильним розчином.
- Частота зміни пов'язки залежить від стану рани.

- Гель Hydrosorb® Gel можна залишати на рані не більше 3 днів.
- Гель Hydrosorb® Gel слід замінити, якщо з вторинної пов'язки починає витікати ексудат.

Протипоказання

- Hydrosorb® Gel неможна застосовувати при гіперчутливості до одного з компонентів.
- Не застосовувати про опіках третього ступеню.

Спеціальні попередження

- Призначено тільки для зовнішнього застосування.
- Інфіковані рани вимагають щоденного лікарського контролю і відповідного системного лікування. Зміну пов'язки слід здійснювати відповідно до рекомендацій лікаря. В разі інфікування рани гель Hydrosorb® Gel можна застосовувати далі тільки під наглядом лікаря і при дотриманні його вказівок.

Особливі вказівки

Зберігати в сухому місці при температурі від 5 °C до 40 °C, захищати від прямого сонячного світла. Не заморожувати. Не застосовувати, якщо упаковка розкрита або шприц пошкоджений. Повторно не стерилізувати.

Берегти від дітей

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 12.2023 року

Значення символів

	Обмеження температури		Берегти від вологи
	Не застосовувати в разі пошкодження пакування		Без застосування латексу
	Виробник		Номер за каталогом
	Пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці		Упаковку слід викинути в урну
	Повторно не використовувати		Знак переробки целюлозної продукції
	Користуйтеся інструкцією із застосування		Обережно, зверніться до інструкції із застосування
	Стерилізація із застосуванням методів асептичного оброблення		CE знак, отриманий у відповідності з Директивою 93/42/ЕЕС

Берегти від дітей.



UA.TR.116

PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Str. 12,
89522 Heidenheim, Germany

ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ, Пауль-Хартманн-
Штр. 12, 89522 Хайденхайм, Німеччина

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА»,
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21,
Україна

Тел.: 0 800 21-52-32

Електронна пошта: uaгер@cratia.ua

